

# 宫腔镜

带有综合保护型内窥镜  
用户手册

1. 放置综合保护型内窥镜。



2. 将扩张器支架放入  
保护窥镜。



3. 轻轻地  
将扩张器顶部放到  
宫颈管中。



4. 将扩张器放入支架。



5. 轻轻推动直至极限，以扩张  
宫颈管并低置子宫。



6. 向左旋转扩张器手柄以解  
锁保护管。  
将其拉出并留在宫颈管内。



7. 宫颈管被开放并保护。

8. 介入后，将扩张器放置  
在内，推动直至极限。  
向右旋转以锁定保护管。



9. 将其拔出以释放宫颈  
管，让它自然闭合。



STERILE R CE



TECHNOPLAST MEDICAL  
Bodva ut 7  
3561 Felsőzsolca - 匈牙利

EC REP

GYNETECH ADVANCE  
12/15 Quai du Commerce,  
Lyon - France



自制造之日起5年内可安全使用。