


# यूटेरोस्कोप

समन्वित सुरक्षात्मक स्पेक्युलम के साथ

उपयोगकर्ता नियमावली

1. एकीकृत सुरक्षात्मक स्पेक्युलम रखें

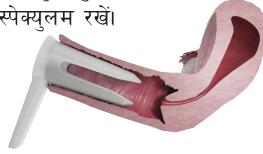

2. विस्तारक (डाइलेटर) को सुरक्षात्मक स्पेक्युलम में डालें।



3. डाइलेटर के शीर्ष को आराम से ग्रीवा नलिका में डालें।




4. डाइलेटर को धारक में डालें।



5. ग्रीवा नलिका को फैलाने और गर्भाशय को नीचे लाने की सीमा तक आराम से घुसाएं।



6. सुरक्षात्मक ट्यूब को अनलाँक करने के लिए डाइलेटर के हैंडल को बाईं ओर घुमाएं। इसे बाहर खींचें और इसे ग्रीवा नलिका के अंदर छोड़ दें।

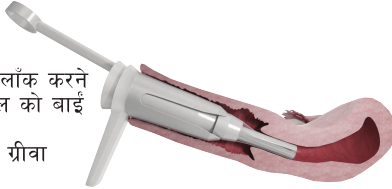

7. ग्रीवा नलिका खुल गई है और संरक्षित हो गई है।

8. हस्तक्षेप के बाद डाइलेटर को सीमा तक भीतर रखें। सुरक्षात्मक ट्यूब को लाँक करने के लिए इसे दाईं ओर घुमाएं।



9. ग्रीवा की नलिका को रिलीज करने और उसे स्वाभाविक रूप से बंद होने देने के लिए इसे बाहर खींचें।

STERILE R CE

TECHNOPLAST MEDICAL  
Bodva ut 7  
3561 Felsőzsolca - हंगरी

EC REP

GYNETECH ADVANCE  
12/15 Quai du Commerce,  
Lyon - France



बिनिर्माण की तारीख से छह वर्षों के भीतर उपयोग के लिए सुरक्षित