

UTEROSCOPIO

CON SPECULUM DI PROTEZIONE INTEGRATO

MANUALE UTENTE

1. Posizionare lo speculum di protezione integrato.



2. Mettere il supporto del dilatatore nello speculum di protezione.



3. Posizionare delicatamente la parte superiore del dilatatore nel canale cervicale.




4. Inserire il dilatatore nel supporto.



5. Spingere delicatamente fino al limite per dilatare il canale cervicale e abbassare l'utero.




6. Girare la maniglia del dilatatore a sinistra per sbloccare il tubo di protezione. Tiralo fuori e lascialo all'interno del canale cervicale.

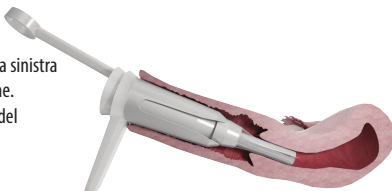

7. Il canale cervicale viene aperto e conservato.



8. Dopo l'intervento mettere il dilatatore all'interno, fino al limite. Ruotatelo in senso orario per bloccare il tubo di protezione.

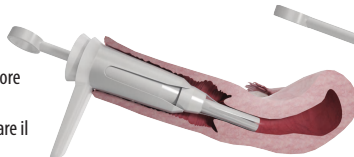

9. Tiralo fuori per liberare il canale cervicale e lasciarlo chiudere naturalmente.



STERILE R CE



TECHNOPLAST MEDICAL
Bodva ut 7
3561 Felsőszolca - Ungheria

EC REP

GYNETECH ADVANCE
12/15 Quai du Commerce,
Lyon - France



Sicuro per l'uso entro 5 anni dalla data di produzione