

ヒステロスコープ 統合された保護鏡付き

ユーザーマニュアル

1. 統合された保護スペクトルを配置します。



2. 拡張器ホルダーを保護検鏡に入れます。



3. 拡張器の上部を子宮頸管にそって置きます。




4. ホルダーに拡張器を入力します。



5. 子宮頸管を拡張させるために優しく限界まで押し、子宮を下げます。




6. 拡張ハンドルを左に回して、保護チューブのロックを解除します。それを引き出して、子宮頸管の中に残します。

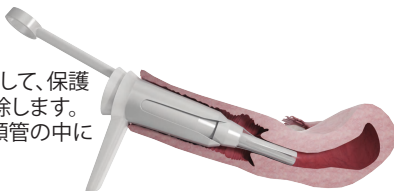

7. 子宮頸管が開かれ、保たれます。

8. 介入後、限界まで拡張器を内部に配置します。しっかりと回し保護チューブをロックします。

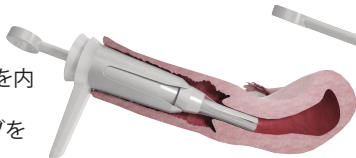

9. それを引き出して子宮頸管を解放し、自然に閉じます。



STERILE R CE



TECHNOPLAST MEDICAL
Bodva ut 7
3561 Felsőzsolca - ハンガリー

EC REP

GYNETECH ADVANCE
12/15 Quai du Commerce,
Lyon - France



製造日から5年以内は安全に使用できます