

UTEROSCOOP

MET GEÏNTEGREERD BESCHERMEND SPECULUM

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Plaats het geïntegreerde beschermende speculum.



2. Zet de dilatatorhouder in het beschermende speculum.



3. Plaats de bovenkant van de dilatator in de baarmoederhals.




4. Schuif de dilatator in de houder.



5. Duw zachtjes zover het kan om de baarmoederhals te verwijderen en de baarmoeder te laten zakken.



6. Draai de dilatatorhendel naar links om de beschermbuis te ontgrendelen. Trek het eruit en laat het in de baarmoederhals.

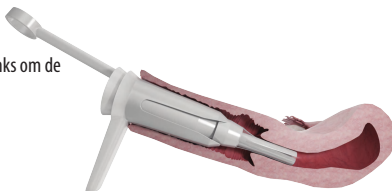

7. De baarmoederhals is geopend en beschermd.

8. Breng de dilatator na de ingreep naar binnen zover het kan. Draai het naar rechts om de beschermbuis te vergrendelen.



9. Trek het eruit om de baarmoederhals vrij te maken en laat het op natuurlijke wijze sluiten.



STERILE R CE



TECHNOPLAST MEDICAL
Bodva ut 7
3561 Felsőzsolca - Hongarije

EC REP

GYNETECH ADVANCE
12/15 Quai du Commerce,
Lyon - France



Veilig te gebruiken binnen 5 jaar na productiedatum