

HISTEROSCÓPIO COM ESPÉCULO DE PROTEÇÃO INTEGRADO

MANUAL DO UTILIZADOR

1. Coloque o espéculo de proteção integrado em posição.



2. Ponha o suporte do dilatador no espéculo de proteção.



3. Coloque a ponta do dilatador no canal cervical.




4. Insira o dilatador no suporte.



5. Empurre devagar até ao limite para dilatar o canal cervical e baixar o útero.




6. Vire o suporte do dilatador para a esquerda para desbloquear o tubo de proteção. Puxe-o e deixe-o dentro do canal cervical.

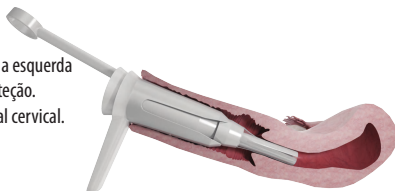

7. O canal cervical está aberto e conservado.

8. Após a intervenção, coloque o dilatador dentro até ao limite. Rode-o corretamente para bloquear o tubo de proteção.

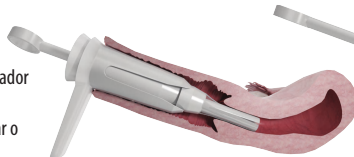

9. Retire-o para libertar o canal cervical e deixe que este se feche naturalmente.



STERILE R CE

TECHNOPLAST MEDICAL
Bodva ut 7
3561 Felsozsolca - Hungria

EC REP

GYNETECH ADVANCE
12/15 Quai du Commerce,
Lyon - France



Pode usar durante 5 anos desde a data de fabricação.