


ГИСТЕРОСКОП


СО ВСТРОЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ

ИНСТРУКЦИЯ

1. Установите встроенный защитный колпачок.

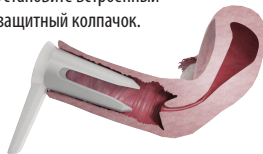

2. Расположите держатель расширителя в защитном колпачке.

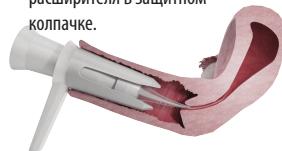

3. Аккуратно вставьте наконечник расширителя в цервикальный канал.




4. Введите расширитель в держатель.



5. Мягко надавите до упора, чтобы расширить цервикальный канал и опустить матку.




6. Поверните ручку расширителя влево, чтобы разблокировать защитную трубку. Вытяните ее и оставьте внутри цервикального канала.

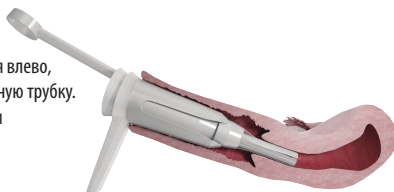

7. Цервикальный канал открыт и защищен.

8. После выполнения манипуляции расположите расширитель внутри, до упора. Поверните его вправо, чтобы заблокировать защитную трубку.

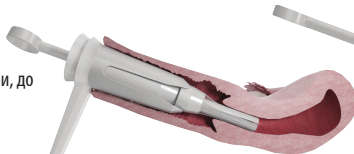

9. Вытяните его наружу, чтобы освободить цервикальный канал и обеспечить естественное закрытие.



STERILE R CE



TECHNOPLAST MEDICAL
Bodva ut 7
3561 Felsőzsolca – Венгрия

EC REP

GYNETECH ADVANCE
12/15 Quai du Commerce,
Lyon – France



Безопасно для использования в течение 5 лет от даты изготовления